



**BRÜDER GRIMM  
FESTSPIELE HANAU**

AMPHITHEATER SCHLOSS PHILIPPSRUHE · WALLONISCHE RUINE

## **Nähanleitung für die „Hanau Maske“ aus der Schneiderei der Brüder Grimm Festspiele Hanau**

**Für eine Maske werden benötigt:**

**Material:**

- 2 Baumwoll- oder Jersey-Bändchen, 2,5 x 90 cm
- Nähgarn
- 1 Baumwoll-Tuch, 17 x 34 cm (vorgewaschen und gebügelt)
- 1 Metallstäbchen zum einschieben (Bspw. aus einem Heftschieber)



### Schritt 1:

Das Baumwolltuch auf der Hälfte zusammenklappen und die Naht oben Füßchenbreit schließen (Stichlänge 2 – 2,5 ). An beiden Enden verriegeln



### Schritt 2:

Wenden. Die Naht zur Seite bügeln, dann den Bruch bügeln



### Schritt 3:

Auf dem gebügelten Bruch Füßchenbreit einen Tunnel steppen



### Schritt 4:

Das genähte Stück auf der Hälfte zusammenklappen und die Falten (Faltentiefe 1,2 cm) ca. 1 cm oben und unten abnähen.

Aufklappen, eine Seite zur neuen Mitte klappen und auch hier die Falten abnähen. Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen.





## Schritt 4:

Falten ausbügeln



Stäbchen in den Tunnel einschieben



## Schritt 5:



Bei Baumwoll-Bändchen:

Die Mitte der Bändchen markieren, Das Band mit Zickzackstich zusammennähen, auf der Mitte des Bandes die vorbereitete Maske dazwischenschieben. Hierbei am Anfang der eingeschobenen Maske und am Ende der Maske verriegeln.



## Bei Jersey-Bändchen:

Die Mitte des Bändchens markieren, auf einer Seite der Maske das Bändchen annähen mit geradem Stich annähen , umklappen und auf der anderen Seite mit Zickzackstich übernähen. Nach dem Annähen die Bänder lang ziehen und Knötchen in die Enden machen.

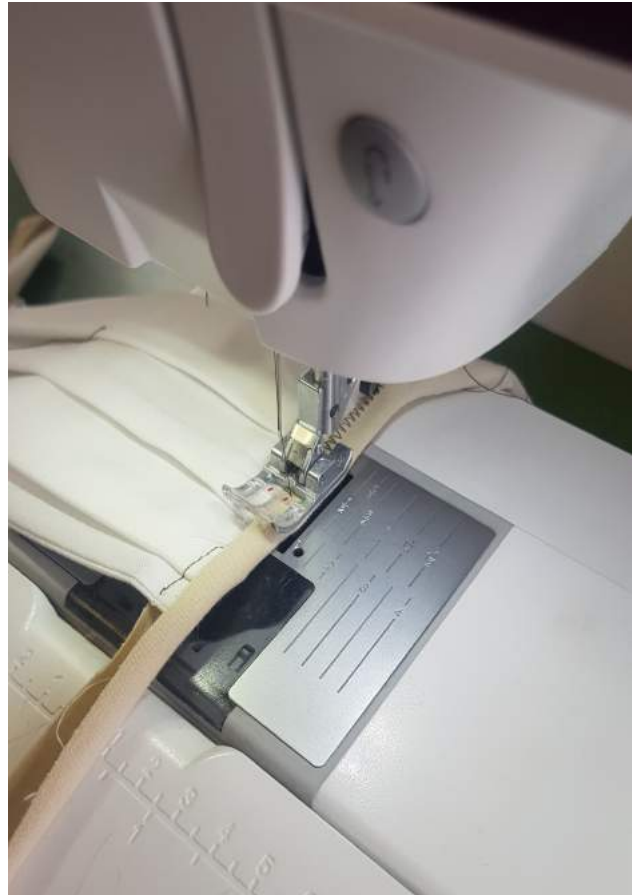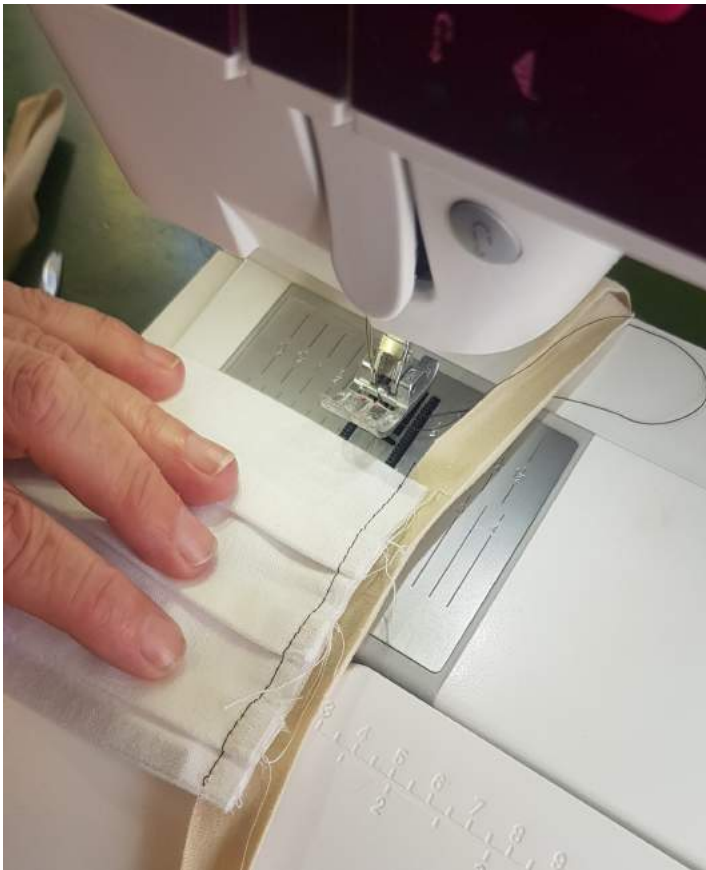

## Fertige Maske mit Baumwoll-Bändchen:



**Fertige Maske mit Jersey-Bändchen:**



# WICHTIG:

Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen. Den Mindestabstand von 1,5 Metern ersetzen sie nicht.

Das Tragen einer Maske kann zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Dadurch läuft der Träger Gefahr, wichtige Hygienemaßnahmen wie etwa das Händewaschen zu vergessen.

Extrem wichtig ist das regelmäßige Wechseln der Maske (bei Durchfeuchtung sofort wechseln, mindestens aber einmal pro Tag wechseln) und das Waschen und Bügeln bei hohen Temperaturen nach jedem Gebrauch.